

LA RADIO-
FRÉQUENCE
AU SERVICE
DE VOTRE
INTIMITÉ



Une première consultation avec votre médecin vous permettra d'exposer votre problématique. Il vous proposera alors un devis et un protocole de soins.



Chaque séance de Radiofréquence fractionnée dure entre 20 et 40 minutes.



Un traitement par RF peut être combiné avec d'autres techniques de médecine esthétique. Votre médecin vous informera sur les modalités de ces traitements multiples.



06 244 6500

Votre médecin utilise le dispositif Fraxx de radiofréquence fractionnée micro-ablative. Renseignez-vous auprès de lui pour de plus amples informations.



BIOMED *Linly*
TRAITEMENTS INTIME PAR RADIOFRÉQUENCE

AIMEZ VOTRE
INTIMITÉ.



BIOMED *Linly*
TRAITEMENTS INTIMES PAR RADIOFRÉQUENCE

AIMEZ VOTRE INTIMITÉ.

La médecine peut aujourd'hui vous aider à résoudre vos problématiques intimes. Non chirurgicale et respectueuse, découvrez la technologie qui vous permet de vous sentir mieux dans votre corps et retrouver confiance, simplement et sans chirurgie ni traitement lourd.

⊕ COMMENT ÇA MARCHE ?

Une unité centrale à laquelle est reliée une pièce à main produit une onde de haute radiofréquence. Cette pièce à main est appliquée sur la zone à traiter, sur la vulve ou en intravaginal.

⊕ QUEL RECU A-T-ON SUR CES TECHNIQUES ?

Près de 40 000 unités Fraxx ont été vendues à travers le monde et plus de 100 000 patients ont déjà bénéficié de ce traitement.

Le corps et l'intimité des femmes connaissent de grands bouleversements au cours de la vie. Grossesse, maternité, ménopause ou problèmes hormonaux influent sur la qualité de la vie intime et sexuelle. De nombreux problèmes peuvent désormais trouver une réponse grâce à des traitements médicaux accessibles et efficaces. Reprenez le pouvoir. Aimez votre intimité.

⊕ EST-CE DOULOUREUX ?

La Radiofréquence fractionnée appliquée à la zone intime peut être un peu douloureuse durant l'acte et en post-soin. En traitement interne ou externe, le médecin est attentif à votre bien être et prévoit une anesthésie locale afin de limiter l'inconfort.


PROBLÈMES ADAPTÉS À UN TRAITEMENT LINLY-INTIMITÉ.

⊕ Rajeunissement vaginal (interne)

Laxité vaginale
Sécheresse vaginale
Dyspareunie
(douleur pendant les rapports)

⊕ Rajeunissement de la vulve (externe)

Rétraction cutanée
(xoxoxo ooxoxo xoxo)

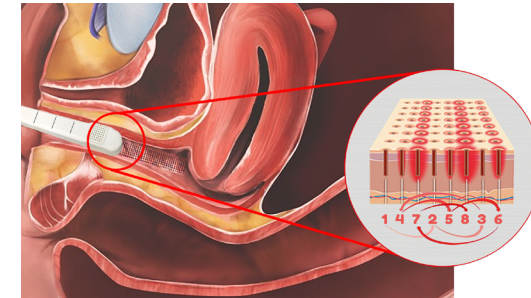

AVANTAGES DE LA RADIOFRÉQUENCE FRACTIONNÉE



TECHNIQUE NON CHIRURGICALE SANS BISTOURI, SUTURE, PLAIE NI PANSEMENT



INTERVENTION SANS DOULEUR



REPRISE RAPIDE DES ACTIVITÉS (APRÈS 48 À 72 HEURES)



RÉSULTATS PROUVÉS ET

La Radiofréquence fractionnée agit sur le collagène naturel en réparant les tissus lésés.

85%

De taux de satisfaction des patients traités, toutes indications confondues, après le protocole Fraxx.

47%

C'est la réduction moyenne des rides et ridules après 3 séances de Fraxx.